

GEBRAUCHSANWEISUNG

COMPACT

Leichtgewicht Rollator



INHALT

1. Vorbemerkung.....	4
2. Allgemeine Hinweise.....	5
2.1. Zweckbestimmung.....	5
2.2. Indikationen.....	5
2.3. Kontraindikationen.....	5
2.4. Nutzungsdauer.....	5
2.5. Verantwortlichkeit.....	6
2.6. Konformitätserklärung.....	6
2.7. Vorkommnisse.....	6
3. Produkt- und Lieferübersicht.....	7
3.1. Prüfung der Lieferung.....	7
3.2. Lieferumfang.....	7
3.3. Übersicht des COMPACT.....	8
4. Montage.....	9
4.1. Aufstellen und aufklappen.....	9
4.2. Rückenlehne anbringen.....	11
4.3. Netztasche anbringen / entfernen.....	12
5. Einrichten.....	13
5.1. Griffhöhe.....	13
5.2. Stockhalterung anbringen.....	13
5.3. Rückenlehnenhöhe.....	14
5.4. Bremsen.....	14
5.5. Bremswirkung verstärken/verringern.....	15
6. Benutzung des Compact.....	16
6.1. Zusammenfallen und abklappen.....	16
6.2. Gehen mit dem Rollator.....	17
6.3. Ankipphilfe.....	17
6.4. Betriebsbremsen.....	18
6.5. Feststellbremsen.....	18
6.6. Der Rollator als Sitzgelegenheit.....	19
6.7. Tragen des Rollators.....	19
6.8. Fehlerbeseitigung.....	20

6.9.	Sicherheitshinweise	21
6.10.	Kennzeichnung.....	22
7.	Reinigung und Desinfektion.....	22
7.1.	Reinigung	22
7.2.	Desinfektion.....	23
8.	Wiedereinsatz	23
9.	Entsorgung	23
10.	Reparatur und Wartung für den Fachhandel.....	25
11.	Garantie	26
12.	Konformitätserklärung.....	27

1. VORBEMERKUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den COMPACT Leichtgewicht Rollator entschieden haben.

Die Qualität dieses Rollators wird Sie nicht enttäuschen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung gründlich durch, bevor Sie den Rollator zum ersten Mal benutzen.

Sie enthält wichtige Sicherheitshinweise und wertvolle Tipps für die richtige Be-nutzung und Pflege des Rollators. Wenn Sie Fragen haben oder zusätzliche In-formationen benötigen, wenden Sie sich an den Fachhändler, welcher Ihnen den COMPACT Rollator geliefert hat. Er berät Sie gerne.

	Seriennummer	Ermöglicht die Zuordnung des Medizinproduktes zu einer Produktionscharge
	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinproduktes
	Herstellungsdatum	Zeitpunkt der Herstellung
	Gebrauchsanweisung beachten	Die Gebrauchsanweisung ist vom Anwender vor der Anwendung vollständig durchzulesen
	CE- Kennzeichnung	Konformitätserklärung, Gerät entspricht der Europäischen Verordnung für Medizinprodukt MDR 2017/745
	Sicherheitshinweis	Wichtiger Hinweis zur Vermeidung von Gefährdungen
	Kennzeichnung	Medizinprodukt
	Wichtige Information	Hilfreiche Tipps zur Anwendung des Produktes

2. ALLGEMEINE HINWEISE

Die Ihnen vorliegende Gebrauchsanweisung soll Ihnen dabei helfen, sich mit der Bedienung und Handhabung des Rollators besser vertraut zu machen. Diese ist ein fester und notwendiger Bestandteil des Rollators. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung griffbereit auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Rollators mit. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung des Rollators komplett durch.

2.1. Zweckbestimmung

Der Rollator COMPACT ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert. Er ist ausschließlich als Gehhilfe gedacht. Der Rollator darf nur von einer Person und nicht zur Beförderung von Personen verwendet werden.

2.2. Indikationen

Der Rollator ist für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet, die noch über ausreichend Gehfähigkeit, Kraft und Standsicherheit verfügen, um mit Unterstützung des Rollators die Wohnung verlassen zu können. Der Rollator ist für den Innen- und Außenbereich auf festem Untergrund geeignet.

2.3. Kontraindikationen

Die Verwendung des Rollators ist ungeeignet bei

- Wahrnehmungsstörungen
- Starken Gleichgewichtsstörungen
- Gliedmaßenverlust an den Armen
- Sitzunfähigkeit

2.4. Nutzungsdauer

Die zu erwartende Lebensdauer des Rollators beträgt bei bestimmungsgemäßem Gebrauch, Einhaltung der Sicherheits-, Pflege- und Wartungshinweise bis zu 5 Jahren. Über diesen

Zeitraum hinaus kann der Rollator, sofern er sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet, weiterverwendet werden.

2.5. Verantwortlichkeit

Wir können uns als Hersteller nur dann für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Rollators verantwortlich betrachten, wenn Änderungen, Erweiterungen, Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von Personen ausgeführt werden, die von uns dazu ermächtigt wurden und der Rollator unter Beachtung aller Gebrauchshinweise benutzt wird.

2.6. Konformitätserklärung

Die Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH erklärt als Hersteller des Produkts, dass der Rollator COMPACT den Anforderungen der Europäischen der Europäischen Verordnung für Medizinprodukt MDR 2017/745 entspricht.

2.7. Vorkommnisse

Vorkommnisse sind unverzüglich an die zuständige Bundesbehörde, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu melden. Unter Vorkommnissen versteht man:

- Jede Funktionsstörung
- Jeder Ausfall und jede Änderung der Merkmale oder der Leistungen
- Jede unsachgemäße Kennzeichnung oder Gebrauchsanweisung eines Medizinproduktes, die zum Tode oder zu einer schwerwiegenden Verschlechterung des Gesundheitszustandes eines Anwenders, Patienten oder einer anderen Person geführt hat, geführt haben könnte oder führen könnte.

3. PRODUKT- UND LIEFERÜBERSICHT

3.1. Prüfung der Lieferung

Der Rollator COMPACT wird teilweise montiert in einem Karton geliefert. Nach dem Auspacken bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial nach Möglichkeit auf. Er dient zur evtl. späteren Einlagerung des Rollators.

Prüfen Sie den Lieferungsinhalt nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Im Falle von Beschädigungen benutzen Sie das Produkt noch nicht. Informieren Sie zuerst Ihren Fachhändler.

3.2. Lieferumfang

Der Inhalt besteht aus folgenden Hauptkomponenten:

- Umverpackung
- Rollator
- Rückengurt
- Netztasche
- Stockhalter (2teilig)
- Gebrauchsanweisung
- Serviceheft



3.3. Übersicht des COMPACT

- ① Rückenlehne
- ② Höhenverstellung der Griffe
- ③ Netztasche
- ④ Vorderräder (lenkbar)
- ⑤ Bremse (beidseitig)
- ⑥ Hinterräder
- ⑦ Ankipphilfe (beidseitig)
- ⑧ Schiebegriffe
- ⑨ Reflektoren
- ⑩ Sitz
- ⑪ Bremshebel
- ⑫ Sicherungstifte



Typenschild an der Innenseite des linken Rahmens mit Seriennummer und Herstellungsdatum (Auf der Abbildung nicht sichtbar)

4. MONTAGE

4.1. Aufstellen und aufklappen

Legen Sie den Rollator seitlich vor sich auf den Boden.



Ziehen Sie den Ring mit dem Sicherungsstift aus dem Rahmen



Nun ziehen Sie das Rohr mit den Rädern von den Handgriffen weg bis zum Anschlag.

Fixieren sie diese Position mit dem Sicherungsstift an der entsprechenden Stelle. Gehen Sie mit der anderen Seite genauso vor.



Jetzt können Sie den Rollator aufstellen, um ihn zu entfalten.



Ziehen Sie hierzu die Griffe auseinander, bis sich die Sitzfläche ausklappt. Nun drücken Sie mit beiden Händen die Sitzfläche an den Seiten nach unten, bis Sie spüren, dass die Sitzfläche einrastet. Achtung Klemmgefahr: Halten Sie Ihre Hände flach auf dem Sitz.



4.2. Rückenlehne anbringen

Entfernen Sie die Schraube an den Halterungen der Rückenlehne. Spreizen Sie die Halterung und schieben Sie sie über die schmale Kante des Griffrohrs. Schieben Sie sie auf Ihre gewünschte Höhe, setzen Sie die Schraube wieder ein und ziehen sie fest. Sie können jederzeit nachträglich die Höhe der Rückenlehne anpassen.



4.3. Netztasche anbringen / entfernen

Der Rollator verfügt über eine Netztasche, die an den Führungsschienen innen, am Rahmen oberhalb der Laufräder, angebracht werden kann. Wenn Sie die Tasche nicht benötigen, kann Sie einfach nach vorn abgezogen werden.



5. EINRICHTEN

5.1. Griffhöhe

Sie können die Höhe der Griffe auf Ihre Körpergröße anpassen. Dafür benötigen Sie kein Werkzeug.

Unterhalb jedes Griffes finden Sie einen Kippschalter (Abbildung). Drücken Sie den Kippschalter am unteren Ende herein. Halten Sie den Knopf gedrückt. Jetzt können Sie diesen Griff hochziehen oder herunterdrücken. Lassen Sie den Knopf los. Ziehen oder drücken Sie nun nochmals, bis Sie hören und merken, dass der Griff eingerastet ist und nicht mehr verstellt werden kann.



Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite, um beide Griffe auf die gleiche Höhe einzustellen.

Achtung Klemmgefahr.
 Achten Sie bei der Montage und dem Anbau der verschiedenen Teile, auf Ihre Finger. Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen.


5.2. Stockhalterung anbringen

Sie können an dem Rollator Ihren Gehstock mitführen. Befestigen Sie die untere Stockhalterung mit der Abstellfläche an dem unteren Teil des Seitenrahmens. Die Halterung mit der Klemmvorrichtung wird unterhalb der Griffhalterung angebracht.



5.3. Rückenlehnenhöhe

Sie können die Höhe der Rückenlehne auf Ihre Körpergröße anpassen. Dafür benötigen Sie kein Werkzeug. An den Außenseiten des Gestänges, direkt unterhalb der Griffe, finden Sie auf jeder Seite eine schwarze Einstellschraube (Abbildung).

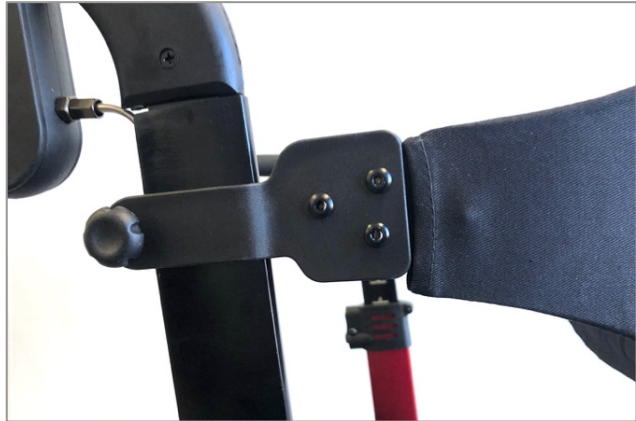

Lockern Sie die Schraube etwas. Schieben Sie nun die Halterung der Rückenlehne in die gewünschte Höhe. Drehen Sie die Schraube wieder fest.




Wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite. Beachten Sie, dass die Höhe auf beiden Seiten gleich eingestellt ist.

5.4. Bremsen

Die Einstellung an den Bremsen sollte von geschulten Fachleuten durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch über ausreichende Sachkunde verfügen, können Sie diese Arbeit auch selbst durchführen. Bedenken Sie jedoch, dass falsch eingestellte Bremsen lebensbedrohliche Folgen haben können.

Die Bremsen sind dann korrekt eingestellt, wenn die Räder bei Nichtbetätigen der Bremse, frei laufen und die Bremsbolzen die Räder nicht berühren. Bei angezogenen Bremsen darf sich der Rollator nicht wegrollen lassen. Die Feststellbremse muss ohne große Kraftanwendung zu betätigen sein.

5.5. Bremswirkung verstärken/verringern

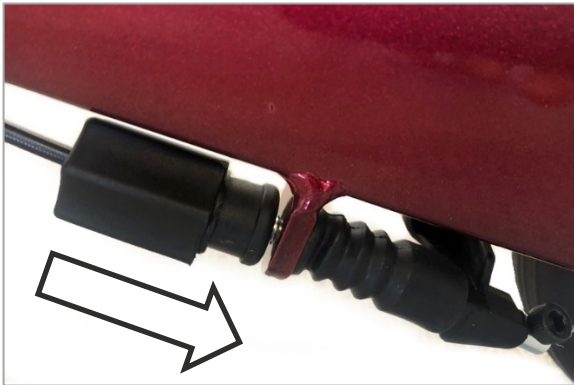

1. Schieben Sie die Kunststoff-Sechskanthalterung über die Kunststoffschraube. Nun können Sie mit Hilfe der Sechskantverkleidung die Schraube nach rechts, zum Lockern der Bremskraft oder nach links, zum Verstärken der Bremswirkung einstellen.
2. Wenn Sie die Kunststoffhalterung loslassen, geht sie in ihre Ausgangsposition zurück.
3. Einstellschraube im Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verringern.
Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn drehen: Bremswirkung verstärken.

Gehen Sie bei der anderen Bremse genauso vor.

6. BENUTZUNG DES COMPACT

6.1. Zusammenfallen und abklappen

Betätigen Sie die Feststellbremsen. Stellen Sie sicher, dass die Netztasche leer ist, oder nehmen Sie diese komplett ab.

Vergewissern Sie sich, dass die Sicherungsstifte eingelegt sind, da sich beim Zusammenfallen die Arretierung der Klappfunktion der Schiebegriffe öffnet. Dies könnte zum Sturz führen. Stellen Sie sich wieder hinter Ihren Rollator. Halten Sie eine Hand am Griff, mit der anderen Hand ziehen Sie die Schlaufe auf der Sitzfläche nach oben. Die Arretierung löst sich, und der Rollator faltet sich zusammen. Drücken Sie mit der Handkante nun die Sitzfläche nach unten. Anschließend schieben sie die beiden Griffe noch enger zusammen, bis der Rollator komplett gefaltet ist.



Zusammengefoldet lässt sich der Rollator bequem im Kofferraum eines Wagens transportieren. Die Mitnahme in Flugzeugen sprechen Sie bitte vorher mit Ihrer Fluggesellschaft ab.

Um den Rollator noch kompakter für z.B. einen Transport im Fahrzeug vorzubereiten, prüfen sie vor dem Lösen der Sicherungsstifte, ob beide Schiebegriffe auf der niedrigsten Höhe eingestellt sind. Eine Nichtbeachtung kann eine Beschädigung der Bremse herbeiführen. Entfernen sie dann die Sicherungsstifte und legen die Schiebegriffrohre mit der Sitzfläche nach hinten um.

Sichern sie wiederum den Rollator mit den Stiften in den dafür vorgesehenen Löchern auf beiden Seiten.

6.2. Gehen mit dem Rollator

Erproben Sie die Benutzung des Rollators zuerst auf ebenem, trockenem Boden. Lassen Sie sich nach Möglichkeit dabei begleiten. Üben Sie nach den ersten Versuchen, wenn Sie sich sicherer fühlen, anschließend die Verwendung auf abschüssigen Flächen. Hierbei achten Sie darauf, immer beide Bremsen zu betätigen. Der Rollator würde sich sonst mit dem ungebremsten Rad um das gebremste Rad drehen und Sie könnten stürzen.

Versuchen Sie Hindernisse auf Ihrem Weg immer zu umfahren. Bei Stufen suchen Sie eine Rampe, bei Treppen nehmen Sie den Aufzug. Sollte das nicht möglich sein, muss der Rollator über das Hindernis getragen werden. Suchen Sie sich dafür nach Möglichkeit die Hilfe einer zweiten Person.

6.3. Ankipphilfe

Ihr Rollator ist mit zwei Ankipphilfen ausgerüstet, die Ihnen das Überwinden von Bordsteinen erleichtern sollen. Indem Sie mit dem Fuß auf die Ankipphilfe treten und gleichzeitig den Rollator an den Handgriffen zu sich heranziehen, heben Sie die Vorderräder an. Sie können auf diese Weise, mit nur wenig Kraftaufwand, Bordsteine und andere kleinere Hindernisse überwinden. Bitte achten Sie dabei auf einen festen Stand.



6.4. Betriebsbremsen

Der Rollator hat auf jeder Seite eine Betriebsbremse, die zum Verlangsamen oder Halten dient. Die Bremskraft ist dosierbar und hängt davon ab, wie stark sie den Bremshebel noch oben ziehen. Nutzen Sie immer beide Bremsen gleichzeitig, da sich ansonsten ein Rad weiterbewegt und der Rollator auszubrechen droht und Sie stürzen können. Wenn Sie die Bremshebel loslassen, rollt der Rollator ungebremst weiter.



6.5. Feststellbremsen

Ihr Rollator ist mit Feststellbremsen gegen unbeabsichtigtes Wegrollen ausgerüstet. Sie betätigen die Feststellbremse, indem Sie beide Bremshebel nach unten drücken, bis sie mit einem deutlich hörbaren Klick eingerastet sind. Zum Lösen der Feststellbremse ziehen Sie die Bremshebel wieder nach oben.



6.6. Der Rollator als Sitzgelegenheit

Ihr Rollator ist mit einer Sitzfläche und einer Rückenlehne ausgestattet. Bevor Sie sich setzen, müssen Sie unbedingt die Feststellbremsen anziehen. Der Rollator könnte sonst wegrollen



und, Sie könnten stürzen.

Verwenden Sie kein zusätzliches Sitzkissen, es könnte wegrutschen und Sie könnten stürzen. Achten Sie immer darauf, dass der Rollator komplett entfaltet ist, bevor Sie sich hinsetzen.

6.7. Tragen des Rollators

Wenn Sie eine Stufe oder ein Hindernis überwinden möchten, welches zu hoch ist, um mit der Ankipphilfe überwunden zu werden, können Sie den Rollator an den Haltegriffen anheben.

Wenn Sie den Rollator über eine längere Strecke tragen möchten, falten Sie ihn zusammen und tragen Sie ihn an den Seitenrahmen. Vor dem Falten muss die Transporttasche geleert oder entfernt werden.

6.8. Fehlerbeseitigung

Der Rollator lässt sich nur schwer oder gar nicht schieben.

Die Feststellbremsen sind angezogen, Bremsen lösen.

Räder sind stark verschmutzt, Laub oder Ähnliches hat sich in den Achsen angesammelt. Schmutz entfernen.

Der Rollator lässt sich nicht oder schlecht bremsen.

Bremsen sind falsch eingestellt. Bremsen prüfen und ggf. neu einstellen lassen.

Rollator bricht seitlich aus.

Bremsen werden einseitig genutzt. Nutzen Sie immer beide Bremsen.

Die Griffhöhe ist unterschiedlich eingestellt. Beachten Sie die Skala an den Griffinnenseiten. Stellen Sie beide Griffe in der gleichen Höhe ein.

Bremsen sind falsch eingestellt. Bremsen prüfen und ggf. neu einstellen lassen.

Sollten sich die Probleme nicht lösen lassen, benutzen Sie den Rollator nicht und wenden sich unverzüglich an Ihren Fachhändler.

6.9. Sicherheitshinweise



Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch und handeln Sie entsprechend.

Vor jeder Verwendung müssen der Rollator auf Beschädigungen untersucht und die Bremsen auf ihre einwandfreie Funktion geprüft werden.

Der Rollator ist nicht für die Verwendung auf einer Rolltreppe geeignet (Sturzgefahr!).

Verwenden Sie Ihren Rollator nicht auf sandigem, weichem oder unebenem Untergrund. Sie könnten das Gleichgewicht verlieren und stürzen.

Das Material des Rollators ist nicht flammhemmend.

Schützen Sie Ihren Rollator vor Sonneneinstrahlung, Oberflächen können sich erhitzen und Verbrennungen verursachen.

Hängen Sie keine Taschen oder Lasten an die Griffe, dies beeinflusst die Stabilität und Sie könnten stürzen.

Benutzen Sie den Rollator nicht als Aufstiegshilfe.

Lassen Sie Ihren Rollator nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von kleinen Kindern.

Das maximale Benutzergewicht beträgt 136 kg, die maximale Nutzlast der Tragetasche beträgt 5 kg. Der Rollator darf nicht zum Transport von Lasten verwendet werden. Die Tragetasche ist nicht für den Transport von Tieren geeignet.

Der Rollator kann platzsparend zusammengefaltet werden. Beachten Sie bitte, dass beim Zusammen- und Auseinanderfalten Klemmgefahr besteht. Ziehen Sie zum Falten bzw. Entfalten des Rollators nicht an den Anbauteilen (Bremse, Räder, Korb etc.), sondern immer an der Schlaufe der Sitzfläche bzw. an den Seiten des Sitzes.

6.10. Kennzeichnung

Jeder Rollator ist mit einem Typenschild versehen. Dieses befindet sich auf der Innenseite des linken Rahmens. Die Seriennummer tragen Sie bitte auf dem Garantieabschnitt ein.

Compact



Indoor/Outdoor
Max. Breite 60 cm
Max. Benutzergewicht 136 kg
Gebrauchsanweisung beachten!



08-2019



Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH
Marienring 12 * 76829 Landau



6956410081900017



7. REINIGUNG UND DESINFEKTION

7.1. Reinigung

Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes, haushaltsübliches Reinigungsmittel auf Seifenbasis verwenden.

Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden (keine Drahtbürste verwenden!)

Die Rückenlehne, der Sitz und die Transporttasche können mit einer milden Seifenlauge abgewaschen werden. Trocknen Sie Ihren Rollator anschließend sorgfältig ab.



Verwenden Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger!

7.2. Desinfektion

Vor der Desinfektion muss der Rollator sorgfältig gereinigt werden (s. Kapitel Reinigung). Der Rollator ist mit einem haushaltsüblichen Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Verwenden Sie handelsübliche Sprüh-Desinfektionsmittel oder Wisch-Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis.

8. WIEDEREINSATZ

Der Rollator COMPACT ist für den Wiedereinsatz geeignet. Der Rollator ist zunächst gemäß den beiliegenden Pflege- und Hygienehinweisen gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Bei der Weitergabe des Rollators denken Sie bitte daran, sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer zu übergeben. Die Gebrauchsanweisung ist Teil des Rollators und muss mitgegeben werden. Der Rollator muss von einem autorisierten Fachmann überprüft und einwandfrei übergeben werden.

9. ENTSORGUNG

Wenn Ihr COMPACT nicht mehr verwendet wird und entsorgt werden soll, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Wenn Sie die Entsorgung selbst übernehmen möchten, erkundigen Sie sich bei ortsansässigen Entsorgungsunternehmen nach den Entsorgungsvorschriften Ihres Wohnorts.

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	
Sitzbreite	430 mm
Sitzhöhe	540 mm
Sitztiefe	235 mm
Abstand zwischen den Griffen:	480 mm
Griffhöhe max.	800 mm
Griffhöhe min.	940 mm
Gesamtbreite	610 mm
Gesamtlänge	710 mm
Gesamthöhe	800 – 940 mm
Empfohlene Körpergröße	150-185 cm
Leergewicht (ohne Zubehör)	7,4 kg
Gewicht inkl. Zubehör	8,3 kg
Maximale Belastbarkeit	136 kg
Max. Belastbarkeit Netzkorb	5 kg
Faltmaß	830 x 280 x 380 mm
Räder (pannensicher)	
Lenkräder lenkbar (vorn)	245 x 32 mm
Bremsräder, starr (hinten)	200 x 32 mm
Wenderadius	830 mm

Rohrdurchmesser	56 x 18 x 1,8 mm
Materialien	
Rahmen	Alu, lackiert
Sitz	Nylon, schwarz
Handgriffe	TPR
Rückenlehne	Nylon, schwarz
Reifen	Polyurethan
Lagerbedingungen	Vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitze schützen Vor Feuchtigkeit schützen

10. REPARATUR UND WARTUNG FÜR DEN FACHHANDEL

Dieses Produkt verfügt über Spiralfedern, die über Schwinggabeln für ein positives Dämpfungsverhalten sorgen. Das bedeutet, dass zusätzliche Schrauben, Buchsen und andere Bauteile verwendet werden. Die Festigkeit und Gängigkeit sollte mindestens einmal im Jahr durch den Fachhandel einer Inspektion unterzogen werden. Bei Störungen ist der Rollator SPRING unverzüglich dem Fachhändler zur Instandsetzung zu übergeben. Dokumentieren Sie die Wartungen Ihres Rollators regelmäßig im beiliegenden Serviceheft.



Erkundigen Sie sich beim Fachhändler ob ggf. Ersatzgeräte vorhanden sind.



Dem Fachhändler werden auf Anfrage die notwendigen Informationen und Unterlagen für Reparatur und Instandsetzung zur Verfügung gestellt.

11. GARANTIE

Im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen übernehmen wir ein Jahr Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit und Funktionsfähigkeit für dieses Produkt.

Für alle elektrischen/elektronischen Bauteile wie Akkus und Batterien übernehmen wir 6 Monate Garantie.

Unsere Garantieleistungen beziehen sich auf sämtliche Mängel dieses Produkts, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. In jedem Falle ist der Garantieabschnitt vollständig ausgefüllt bei uns einzureichen.

Von Garantie- und Produkthaftungsansprüchen ausdrücklich ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Das Gleiche gilt beim Aus-tausch oder Ersatz von Originalbauteilen gegen Fremtteile oder dem Original nachgebaute Teile, sowie bei der Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, Schmierölen bzw. Fetten. Die Nichtbeachtung der diesem Produkt beigefügten Gebrauchsanweisung, nicht oder unsachgemäß durchgeführte Wartungsarbeiten, sowie Änderungen und Ergänzungen an diesem Produkt ohne unsere schriftliche Zustimmung führen zum Erlöschen möglicher Garantie und Produkthaftungsansprüche.

12. KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 93/42/EWG erfüllt.

GARANTIEINFORMATION FÜR DAS HILFSMITTEL:	
Modell	
Seriennummer	Stempel des Fachhändlers
Datum der Inbetriebnahme	

Diese Gebrauchsanweisung finden Sie auch digital unter: www.bescomedical.de/downloads



Besco Medical Medizin- und Rehaprodukte GmbH

Düsseldorfer Straße 6-8

68219 Mannheim

Telefon: +49(0)621- 405 408 0

Fax: +49(0)621- 405 408 50

Mail: info@bescomedical.de

Web: www.bescomedical.de



Stand: DE-07/2022