

TRENDMOBIL LR 53 GEBRAUCHSANWEISUNG

Pdf-Herunterladen

Inhaltsverzeichnis

[Lieferumfang](#)

[Produktbeschreibung](#)

[Zweckbestimmung](#)

[Allgemeine Sicherheitshinweise](#)

[Produktaufkleber \(Beispiel LR 53\)](#)

[Technische Daten](#)

[Rückenlehne montieren](#)

[Einkaufskorb montieren](#)

[Einstellen der Bremsen](#)

[Aufstellen](#)

[Bremsen aus der Bewegung](#)

[Zusammenfalten](#)

[Instandhaltung / Wartung](#)

[Wartungsplan](#)

[Wiedereinsatz](#)

[Produktlebensdauer](#)

[Entsorgung Und Recycling](#)

[Andere ManualsLib-Projekte](#)

LR 53/56

Leichtgewichttrollator



Gebrauchsanweisung



Leben in Bewegung

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses!

Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihres Leichtgewichtrollators. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf. Die aktuelle Gebrauchsanweisung zur vergrößerten Darstellung kann bei Ihrem Fachhändler angefordert werden.

Die Modelle LR53 und LR56 unterscheiden sich lediglich in der Sitzhöhe. Ansonsten sind beide Modelle hinsichtlich Konstruktion und Ausstattung identisch.

Modell	Art. Nr.
LR53 Leichtgewichtrollator	14000081
LR56 Leichtgewichtrollator	14000082

Lieferumfang

- Leichtgewichtrollator
- Einkaufskorb
- Rückenbügel
- Bedienungseinleitung

Der Leichtgewichtrollator wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

Produktbeschreibung



- Handgriff
- Bremse
- Rückenlehne
- Einkaufskorb
- Laufräder
- Lenkräder

Zweckbestimmung

Der Rollator LR dient Personen mit eingeschränkter Bewegungsmöglichkeit als Unterstützung beim Gehen, z. B. im häuslichen Bereich oder im Freien. Die Sitzfläche ermöglicht dem Anwender bei langen Wegstrecken auszuruhen oder zu pausieren.

Indikation

Versorgung bei:

- Gehbehinderung
- Stark eingeschränkter Gehausdauer

Kontraindikation

Die Verwendung des Rollators ist nicht angezeigt bei:

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen
- Sitzunfähigkeit



Allgemeine Sicherheitshinweise

- Alle Warnhinweise müssen unbedingt beachtet werden!
- Die maximale Belastbarkeit (Benutzergewicht und Zuladung) von 120 kg darf nicht überschritten werden!
- Der Rollator ist nur als Gehhilfe einer Person geeignet.
- Der Transport von Lasten oder Personen ist nicht erlaubt!
- Benutzen Sie den Rollator nur, wenn die Faltsicherung korrekt eingerastet ist.
- Der Rollator darf nur auf einem festen, ebenen Untergrund benutzt werden!
- Vor der ersten Benutzung empfehlen wir den Umgang mit Ihrem Rollator auf ebenem und bekanntem Gelände zu üben, um riskante Situationen zu vermeiden
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Rollators einwandfrei funktionieren (Beachten Sie bitte den Wartungsplan, Seite 6).
- Achten Sie auf festen Sitz der Rückenlehne.
- Beachten Sie, dass auf abschüssigem Gelände die Rollgeschwindigkeit höher werden kann als die eigene Schrittgeschwindigkeit. Sturzgefahr!
- Betätigen Sie die Feststellbremsen, bevor Sie den Gehwagen als Sitz nutzen!
- Das Kipprisiko kann bei Gleichgewichtsverlagerung durch Körperbewegungen beim Sitzen oder Beladung (Einkaufskorb) vergrößert werden.
- Nutzen Sie das Tablett nur für kleine und leichte Gegenstände. Es ist nicht geeignet für den Transport von spitzen, scharfen oder heißen Gegenständen!
- Kipprisiko: hängen Sie keine Taschen an die Griffe oder andere Teile des Rollators!
- Klemmgefahr: beim Zusammenklappen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden!
- Die Oberflächen des Rollators können sich bei direkter Sonneneinstrahlung aufheizen. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Nicht auf Treppen oder Rolltreppen verwenden!
- Nicht auf das Produkt stellen!
- Der Sitz des Rollators dient nur dem vorübergehenden Ruhen!
- Durch Sand, Meerwasser oder Streusalz können die Lager der Räder beschädigt werden. Reinigen Sie den Rollator gründlich, wenn er solchen Bedingungen ausgesetzt war! (Beachten Sie die Reinigungshinweise auf der Seite 7)
- Bei Einlagerung achten Sie darauf, dass der Rollator trocken, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung gelagert wird (Lagerungsbedingungen s. Seite 3). Der Rollator soll dabei gegen ein ungewünschtes Wegrollen gesichert werden.
- Vor jedem Wiedereinsatz und nach längerer Produktlagerung (mehr als 4 Monate) sollen **alle** im Wartungsplan aufgelistete Maßnahmen (Seite 6) durchgeführt werden



Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, indem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

Produktaufkleber (Beispiel LR 53)



TRENDMOBIL GmbH
 Fohling 24 D-33106 Paderborn
www.trendmobil.com



2022/05

Typ: LR53


Max. Belastbarkeit: 120kg / Max. Belastung Korb: 3 kg

SN

TM1481-22-Wxxxxx

EAN

4 260485 210394

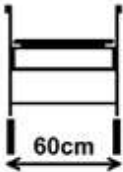

60cm











Der Produktaufkleber ist für die Identifizierung des Produktes sehr wichtig. Er darf nicht entfernt werden. Sollte der Produktaufkleber unlesbar werden oder verloren gegangen sein, muss er ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Leichtgewichtrollator LR 53 / LR 56	
Sitzhöhe (cm)	53 / 56
Schiebegriffhöhe (cm)	83 - 96
Gesamtbreite (cm)	60
Gesamtlänge (cm)	67
Gewicht (kg)	6,7
Zuladung Einkaufskorb (kg)	3
Max- Belastbarkeit (kg)	120
Max. zulässiger Winkel zwischen Längsmittellinie des Griffs und Bewegungsrichtung (Grad)	0
Bereifung	PU-Bereifung
Material	Aluminium (lackiert) Sitzfläche Kunstleder, Rückenpolsterung PU
Farbe	silber
Lagerungsbedingungen (C°)	0 bis + 45

Montagehinweise

Handgriffe montieren und Höhenverstellung

Der Rollator wird weitestgehend vormontiert geliefert.

1. Entnehmen Sie die Schrauben und Sternmutter vom Rahmen
2. Stecken Sie die Handgriffe in die Rohrführung am Rahmen
Positionieren Sie die Handgriffe in der gewünschten Höhe
3. Die Handgriffe sind korrekt eingestellt, wenn Sie sich in der Höhe der Handgelenke befinden
4. Fixieren Sie die eingestellte Höhe mit durch Einstecken der Schrauben und ziehen Sie die Sternmutter fest an Achten Sie darauf, dass sich beide Handgriffe in gleicher Höhe befinden



Rückenlehne montieren

Die Rückenlehne sollten Sie nur montieren, wenn der Rollator in sicherer Position steht und die Bremsen betätigt sind.

1. Nehmen Sie die Rückenlehne und drücken Sie die Klipse rechts und links jeweils mit dem Zeigefinger hinein
2. Schieben Sie die Rückenlehne in die Führung Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht verkanten
3. Zum Entfernen der Rückenlehne gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor

Einkaufskorb montieren

Um den Einkaufskorb zu montieren, hängen Sie diesen mit den vorhandenen Haken an den Rahmen ein.

Transportieren Sie nicht zu hohe Lasten!

Beachten Sie, dass sich durch hohe Lasten das Kipprisiko erhöht!



Einstellen der Bremsen

Die Stärke der Bremskraft kann individuell eingestellt werden. Stellen Sie dazu die Einstellschraube am Bremsgriff oder an der Bremse entsprechend ein.

Die Bremsklötze sollten bei Nichtbetätigung der Bremshebel nicht das Laufrad berühren!



Feststellbremsen

- Um die Feststellbremse zu betätigen, drücken Sie den Bremshebel nach unten.
- Um diese wieder zu lösen, betätigen Sie die Bremse wie gewohnt.

Betätigen Sie die Feststellbremse nie aus der Bewegung heraus!



Aufstellen

1. Positionieren Sie Ihren Rollator vor sich und betätigen Sie die Bremsen.
2. Durch leichten Druck auf die Handgriffe entfaltet sich der Rollator.
3. Drücken Sie die Querstrebe nach unten und klappen Sie den Sitz nach unten.
4. Nun können Sie den Einkaufskorb wie beschrieben einhängen.



Bremsen aus der Bewegung

Um die Geschwindigkeit aus dem Gehen zu reduzieren, betätigen Sie den Hebel am Handgriff. Ziehen die dazu den Griff mit den Fingern zu sich nach oben.



Zusammenfallen

Um Ihren Rollator platzsparend zu transportieren oder aufzubewahren, können Sie diesen zusammenfallen. Nehmen Sie zuerst den Einkaufskorb ab. Klappen Sie den Sitz nach oben und ziehen Sie die Querstrebe nach oben. Der Rollator wird sich dabei zusammenfallen.



Instandhaltung / Wartung

Hinweise für die Fachhändler

Obwohl alle unsere Produkte strenger Qualitätskontrolle unterliegen, weisen wir darauf hin, dass alle Teile und Funktionen des Rollators vor der Abgabe an den Nutzer gründlich geprüft werden müssen. Insbesondere ist auf folgende Punkte zu achten:

- Alle Räder berühren den Boden,
- Alle Räder laufen frei,
- Alle Schrauben sind fest angezogen, besonders die Achsschrauben,
- Feststellbremse und Handbremse funktionieren einwandfrei,
- Klappmechanismus funktioniert einwandfrei.

Eine gründliche Wartung des Produkts sollte mindestens einmal jährlich nach unten aufgeführten Wartungsplan erfolgen und bei der Übergabe an weiteren Nutzer (Wiedereinsatz, S. 7).

Die autorisierte Fachhändler dürfen die Reparaturen nur mit Originalersatzteilen durchführen

Hinweise für die Benutzer

Damit die Nutzung des Rollators jederzeit sicher ist, empfehlen wir regelmäßig deren Zustand und die Funktionen zu überprüfen.

Gebrochene, beschädigte und verbrauchte Teile des Rollators müssen sofort ersetzt werden. Selbstsichernde Muttern müssen nach dem Lösen ausgetauscht werden, da sie ihre selbstsichernde Wirkung verloren haben.

Prüfen Sie **vor jeder Verwendung** die Funktionalität der Bremse. Machen Sie dies mit größter Vorsicht und Gewissenhaftigkeit. Sollten Sie eine Veränderung der Eigenschaften bemerken, kontaktieren Sie bitte Ihren Fachhändler. Eine nicht 100%-ig funktionierende Bremse birgt große Gefahren für Ihre Gesundheit!

Sollten Sie als Nutzer einen Fehler am Produkt entdecken oder bemerken Sie eine Funktionseinschränkung, wie z.B. Schwergängigkeit der Räder, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Es dürfen keine Reparaturen am Produkt durch den Benutzer vorgenommen werden!

Für nicht autorisierte Veränderungen am Produkt übernehmen wir keine Haftung.

Wartungsplan

Maßnahme	Durch Benutzer	Durch Fachhandel
	Vor jeder Verwendung	bei der Übergabe / jährlich
• Funktionalität der Räder kontrollieren	x	x
• Funktionstüchtigkeit der Bremse kontrollieren	x	x
• Klappmechanismus funktioniert einwandfrei	x	x
• Faltsicherung ist korrekt eingerastet	x	x
• Rahmenteile sind unversehrt	x	x
• Schrauben zur Fixierung des Sitzes sind fest angezogen	x	x
• Alle Schrauben zur Fixierung der Räder sind fest angezogen	x	x

Reinigung / Desinfektion

Der Rollator sollte regelmäßig gereinigt werden. Die Desinfektion ist mindestens bei Patientenwechsel durchzuführen.

Die Rahmenteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Die Räder können mit einer feuchten Bürste mit Kunststoffborsten gereinigt werden

- Verwenden Sie keine Drahtbürste!
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung!

Zur Desinfektion der Handgriffe sowie der Sitzfläche verwenden Sie ein handelsübliches Flächenreinigungsmittel.

Wiedereinsatz

Der Rollator ist für den Wiedereinsatz geeignet. Beachten Sie, dass auch sämtliche für eine sichere Handhabung notwendigen technischen Unterlagen dem neuen Nutzer übergeben werden.

Der Rollator sollte vor der Weitergabe gereinigt und desinfiziert werden und durch den Fachhandel nach Wartungsplan geprüft und freigegeben werden.

Produktlebensdauer

Wir gehen von einer Produktlebensdauer von **fünf Jahren** aus. Voraussetzung ist, dass das Produkt unter Beachtung der Wartungs- und Sicherheitsvorgaben in der Bedienungsanleitung bestimmungsgemäß eingesetzt wird.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen **24 Monaten** ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind.

Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind.

Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln, Schmierölen bzw. Fetten.

Von der Garantie ausgenommen sind Verschleißteile, wie Bereifung / Bowdenzüge / Bremsklötze usw.

Entsorgung und Recycling

Wenden Sie sich wegen der ordnungsgemäßen Entsorgung und Recycling Ihres TRENDMOBIL-Produktes und seiner Verpackung an Ihren TRENDMOBIL-Händler.



Ihr Fachhändler:



TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24
33106 Paderborn Deutschland
Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0
Telefax: +49 (0) 5254-9479-299
E-Mail: info@trendmobil.com
Internet: www.trendmobil.com

Andere ManualsLib-Projekte



www.manualslib.com



www.manualslib.de



www.manualslib.es



www.manualslib.fr



www.manualslib.nl



www.manualslib.mx



www.manualslib.tech 30+ Sprachen