

Kurzanleitung: **Solo Bett**

Sichere Arbeitslast: 258 kg


Maximales Patientengewicht: 193 kg

Gebrauch der Handbedienung**Verstellen der Rückenlehne:**

- Anheben durch Drücken des Aufwärtspfeils.
- Die Rückenlehne stoppt automatisch im 30° und im 45° Winkel.
- Absenken durch Drücken des Abwärtspfeils.

Einleiten der Elektronischen CPR:

- Die elektronische CPR ist orange hervorgehoben.
- Leiten Sie die CPR ein, indem Sie die gelben Pfeiltasten der Rückenlehne gleichzeitig gedrückt halten.

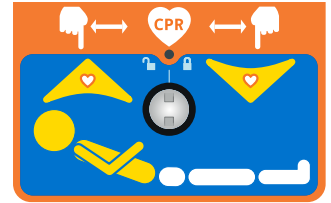**Veränderung der Betthöhe:**


- Anheben durch Drücken des Aufwärtspfeils.
- Die maximale Betthöhe beträgt 83 cm.
- Absenken durch Drücken des Abwärtspfeils.
- Bei 24 cm erfolgt ein automatischer Sicherheitsstopp, um eine visuelle Inspektion zu ermöglichen.
- Senken Sie das Bett durch erneutes Drücken des Abwärtspfeils vollständig ab (ein akustischer Alarm ertönt).
- Die niedrigste Betthöhe beträgt 21 cm.

**Verstellen des Oberschenkelbereichs:**

- Anheben durch Drücken des Aufwärtspfeils.
- Absenken durch Drücken des Abwärtspfeils.
- Vergewissern Sie sich, dass der Wadenbereich flach ist, bevor Sie den Oberschenkelbereich absenken.

**Einstellen der Stuhlposition:**

- Erreichen Sie eine bequeme Stuhlposition, indem Sie den Aufwärtspfeil drücken und gedrückt halten.
- Dadurch werden die Rückenlehne und der Oberschenkelbereich kombiniert aktiviert.
- Drücken Sie erneut, um einen gekippten Stuhl zu erreichen, der die umgekehrte Trendelenburg-Position einnimmt.

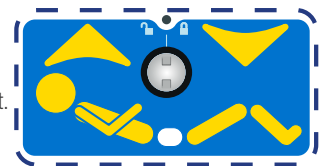**Zurückkehren in die flache Position:**

- Bringen Sie das Bett erneut in eine flache Position, indem Sie den Abwärtspfeil drücken.

Benutzerdefinierte Höheneinstellung:

- Die benutzerdefinierte Höheneinstellung wird durch eine blau gepunktete Umrandung um die Schaltflächen "Stuhl" und "Zurück in die flache Position" angezeigt.
- Wenn der Patient entsprechend seiner Kniehöhe sicher an der Kante des Bettes sitzt, kann die benutzerdefinierte Höhe eingestellt werden. Dafür werden beide Pfeiltasten 10 Sekunden lang gedrückt gehalten, bis ein Signalton ertönt.


Trendelenburg/Antitrendelenburg:

Hinweis: Dies ist eine klinische Funktion und sollte nur von der Pflegekraft bedient werden. Um eine Fehlbedienung zu vermeiden, sperren Sie die Funktion.

- Erreichen Sie die Antitrendelenburg-Position, indem Sie den linken Pfeil drücken.
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis der gewünschte Winkel erreicht ist.
- Kehren Sie in die flache Position zurück, indem Sie den rechten Pfeil drücken - in der flachen Position wird eine kurze Pause eingelegt.
- Erreichen Sie die Trendelenburg-Position, indem Sie weiterhin den rechten Pfeil drücken.

**Sperrfunktionen:**

- Die Sperrfunktion befindet sich zwischen den Tasten der einzelnen Funktionen.
- Sie wird mit einem Schlüssel bedient, der am Handschalterkabel befestigt ist.
- Zum Sperren stecken Sie den Schlüssel in die beiden Aussparungen und drehen ihn im Uhrzeigersinn.
- Zum Entriegeln drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

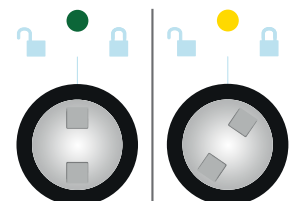

Entsperrt

Gesperrt

Sichere Arbeitslast: 258 kg




Maximales Patientengewicht: 193 kg

Bremse, Lenkung und Seitwärtsbewegung

Bremse:

- Das Bremspedal befindet sich am Fußende.
- Zum Lösen heben Sie das Bremspedal an („Nach oben“ Position).
- Um die Bremse zu betätigen, senken Sie das Bremspedal („Nach unten“ Position).

Hinweis: Die Bremse rastet automatisch in der untersten Position des Bettes ein.

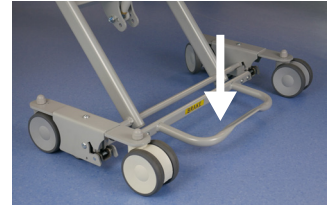


Lenkung:

- Das Lenkpedal befindet sich am Kopfende.
- Es sollte eingerastet sein („Nach unten“ Position), wenn das Bett steht oder durch die Klinik gefahren wird.

Seitwärtsbewegung:

- Für eine Seitwärtsbewegung heben Sie sowohl das Bremspedal als auch das Lenkpedal an.
- Senken Sie beim Umsetzen das Lenkpedal („Nach unten“ Position) am Kopfende ab.

Hinweis: Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Bremspedal bei stillstehendem Bett stets aktiviert ist.

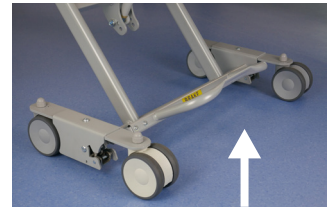

Seitenteile

Geteilte Seitenteile:

- Diese Seitenteile haben ein „Hand-free“ Design.
- Um die Seitenteile abzusenken, entriegeln Sie den Griff. Dann lassen Sie los, das Seitenteil senkt sich eigenständig sanft nach unten ab.
- Zum Anheben des Seitenteils heben Sie den Griff an und verriegeln ihn in angehobener Position mit einem Klick.



Wichtig: Bitte beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanweisung



Lagerung der Handbedienung:

- Verwahren Sie die Handbedienung in der dafür vorgesehenen Halterung an der Innenseite des geteilten Seitenteils, um Schäden zu vermeiden.



Zusätzliche Bettfunktionen (manuell)

Manuelle CPR-Funktion:

- Die manuelle CPR befindet sich am Kopfende des Bettes, über den beidseitigen Hebeln.
- Nehmen Sie zunächst das Kopfteil ab und ziehen Sie dann an den orangefarbenen Griffen, um die Rückenlehne stufenlos in eine flache Position abzusenken (die Bewegung ist zur Sicherheit gedämpft).

Bettverlängerung:

- Verlängern Sie das Bett um weitere 18 cm ab dem Fußende, indem Sie den schwarzen Stöpsel und die Verlängerung am Fußende des Fußbretts herausziehen.
- Heben Sie das Fußteil der Liegefläche an und ziehen Sie an der Unterseite des Rahmens, um die Matratzenplattform zu verlängern (setzen Sie dann das Schlafteil wieder ein).

Einrasten des Fussteils:

- Das Fussenteil lässt sich über einen Einrast-Mechanismus in 3 Positionen verstellen.
- Zum Anheben heben Sie das Ende des Fussteils nach oben.
- Zum Absenken heben Sie es ganz an und senken es auf die gewünschte Höhe ab.

