

Fachhändlerstempel

Seriennummer



TOSCH Rehatechnik GmbH
Breiter Anger 20
D-37115 Duderstadt
Tel.: 05456/935808
Fax: 05456/935809
e-mail: tosch-kinderreha@gmx.de

TOSCH Rehatechnik

Badeliege - Inga

Gebrauchsanleitung



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Stand, 05.2024

Inhalt	2
Vorwort	2
Konformitätserklärung	2
Sicherheitshinweise	3
Auspacken und Aufstellen	4
Kopfwinkelverstellung	5
Rückenwinkelverstellung	5
Fußwinkelverstellung	6
Höhenverstellung	7
Begurtung	9
Pflege/Desinfektion und Wartung	9
Technische Angaben / Daten	10
Gewährleistung / Garantie	11
Nutzungsdauer und Wiedereinsatz	11

Vorwort

Sie haben sich für eine Badeliege der Firma TOSCH Kinderreha OHG entschieden und bekommen hiermit ein qualitativ hochwertiges Produkt aus unserem Hause.

Benutzen sie diese Gebrauchsanleitung, damit unser Produkt Ihnen hilft, den Alltag zu erleichtern.



Um Bedienungsfehler zu vermeiden und ein Höchstmaß an Sicherheit zu erlangen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung bitte genau durch und machen Sie sich gegebenenfalls eine Kopie.



Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt.

Konformitätserklärung

Die Firma TOSCH, Kinderreha OHG erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den Anforderungen der EU Verordnung 2017/745 übereinstimmt.

Gewährleistung/Garantie

Bei allen Produkten gilt die zweijährige gesetzliche Gewährleistungsfrist. Diese beginnt mit der Ablieferung bzw. der Übergabe der Ware. Tritt innerhalb dieser Zeitspanne an der von uns gelieferten Ware nachweislich ein Werkstoff- oder Fabrikationsfehler auf, werden wir bei frachtfreier Rücksendung an uns, den angezeigten Schaden sichten und gegebenenfalls kostenlos und nach unserer Wahl nachbessern oder neu liefern.

Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, beträgt bis zu acht Jahren, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Gebrauchsanleitung erfolgt. Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet.

Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie z.B. Knickgelenke, Polsterteile und Netzgewebe. Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsatzbarkeit obliegt dem Fachhandel. Inga ist für den Wiedereinsatz geeignet. Die Bezüge müssen bei 40 Grad mit einem CE-zertifizierten Desinfektionswaschmittel in einer speziellen Waschmaschine für chemothermische Desinfektionen gewaschen werden. Je nach Zustand der Bezüge ist es natürlich auch möglich die Bezüge beim Wiedereinsatz auszutauschen. Damit entfallen alle erforderlichen Dienstleistungen, um die Aufbereitung der Bezüge zu realisieren. Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil des Produkts und müssen an den neuen Nutzer übergeben werden.



Sollte es während der Nutzungsdauer bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommnis kommen, ist dies unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden

Entsorgung:

Sollte Inga einmal der Entsorgung zugeführt werden müssen, wenden Sie sich bitte an den Entsorger in Ihrer Stadt. Inga lässt sich ohne Probleme recyceln.

Nehmen Sie den Bezugsstoff von dem Rahmen ab und führen ihn dem Restmüll zu.

Der Rohrrahmen aus Aluminium gehört zu den Aluminiumabfällen.

Die Kartonasche führen Sie bitte dem Altpapier zu.

Technische Angaben/ Daten

Material: Aluminiumrohr

Oberfläche: Pulverbeschichtung

Hautverträglicher Bezugsstoff (Netzgewebe).

Größe:	Inga (Gr.1)	Inga (Gr.2)	Inga (Gr.3)
max. Belastung	30 Kg.	50 Kg.	60 Kg.
Eigengewicht	2,5 Kg.	2,8 Kg.	3,2 Kg.
Liegehöhe von - bis	100/280 mm		
Breite gesamt	380 mm	460 mm	460 mm
Standfußbreite	315 mm	380 mm	380 mm
Länge gesamt	1100 mm	1300 mm	1400 mm

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich vor dem Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanleitung gut durch.

Machen Sie sich vor Gebrauch zuerst mit der Handhabung und der Funktion des Produktes vertraut und üben sie den Umgang mit diesem.

Fertigen Sie sich gegebenenfalls eine Kopie der Gebrauchsanleitung an.



- **Achtung: Lassen Sie Ihr Kind in keinem Falle unbeaufsichtigt auf der Badeliege in der Badewanne liegen.**
- **Bei Anrufen, Besuch an der Tür oder ähnlichen Dingen, nehmen Sie Ihr Kind mit!**
- Das Produkt darf nur auf ebenem und festem Untergrund verwendet werden.
- Die maximale Belastung (siehe Typenschild) darf nicht überschritten werden.
- Nach allen Einstellarbeiten die zuvor gelösten Gelenke immer wieder gut einrasten lassen.
- Auch wenn Ihr Kind auf der Badeliege mit einem Gurt gesichert ist, lassen Sie es nie unbeaufsichtigt..
- Heben Sie die Badeliege nur an den Rohren der Sitzfläche an.
- Wenn Sie den Bezugsstoff gewaschen haben, achten Sie beim Wiederanbringen auf eine gute Überlappung der Klettstreifen.
- Es darf immer nur ein Kind zurzeit auf der Badeliege liegen.

Auspacken und Aufstellen

In der Originalverpackung befinden sich folgende Komponenten:


1. Badeliege **Inga**
2. Gebrauchsanleitung
3. Zubehör, je nach Bestellung

Entnehmen Sie zunächst bitte vorsichtig die Badeliege aus dem Karton:

1. Die Badeliege muss nicht montiert werden.
2. Zubehörteile können ohne Werkzeug angebracht werden.

Begurtung

Sie können Ihr Kind auf der Badeliege mit Gurten stabilisieren. Auf dem Bezugsstoff befinden sich Schlaufen, durch welche die Gurte gezogen werden können.

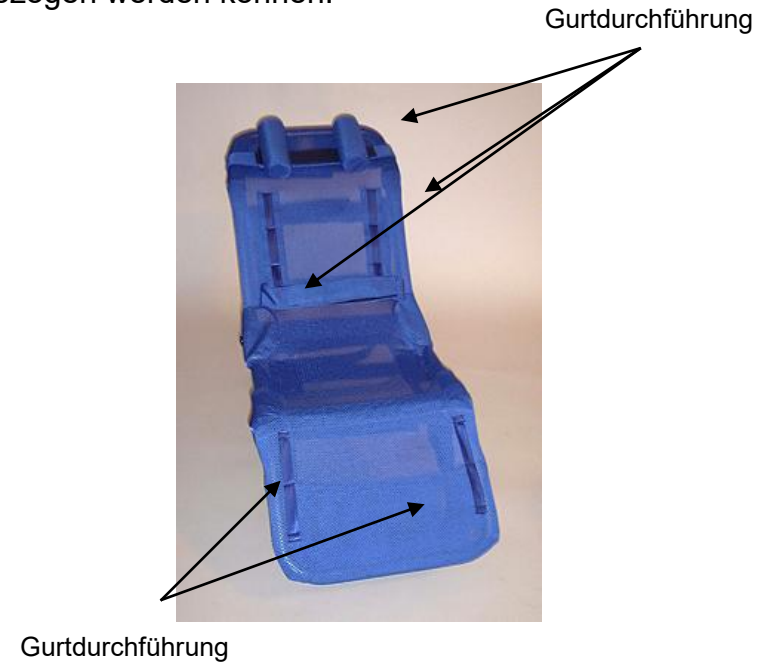

Wartung und Reinigung/Desinfektion:

Inga ist weitgehend wartungsfrei.

Die Reinigung des Rohrrahmens kann mit Wasser und gebräuchlichen Haushaltsmitteln (Neutraseife) erfolgen.

Den Bezugsstoff können Sie in der Waschmaschine bei max. 30 Grad mit mildem Waschmittel waschen.

Die Metall- und Kunststoffteile können mit fertigen, flüssigen Desinfektionsmitteln oder mit vorgetränkten Desinfektionstüchern desinfiziert werden.

Höhenverstellung

Die Badeliege lässt sich in Stufenschritten in der Höhe Ihren Bedürfnissen anpassen.

Durch Umlegen der Verschlusshebel an den beiden Rastergelenken rechts und links, vorn und hinten lässt sich die Badeliege in der Höhe verstellen.

Wenn Sie die benötigte Position gefunden haben, drücken Sie die Verschlusshebel wieder zurück und die Gelenke rasten wieder ein



Rastergelenke vorn

Rastergelenke hinten




Achtung: Die Gelenke müssen hörbar einrasten!

Kopfwinkelverstellung

Der Kopfwinkel lässt sich in Stufenschritten verstellen.

Durch Umlegen der Verschlusshebel an den beiden Rastergelenken rechts und links, lässt sich das Kopfteil im Winkel verstellen.

Wenn Sie die benötigte Position gefunden haben, drücken Sie die Verschlusshebel wieder zurück und die Gelenke rasten wieder ein

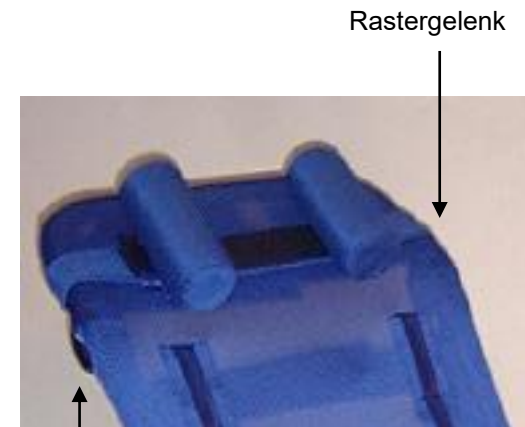

Rastergelenk

Rastergelenk



Achtung: Die Gelenke müssen hörbar einrasten!

Rückenwinkelverstellung

Der Rücken lässt sich in Stufenschritten verstellen.
Durch Umlegen der Verschlusshebel an den beiden Rastergelenken rechts und links am unteren Rückenende, lässt sich der Rücken im Winkel verstellen.

Wenn Sie die benötigte Position gefunden haben, drücken Sie die Verschlusshebel wieder zurück und die Gelenke rasten wieder ein.




 **Achtung: Die Gelenke müssen hörbar einrasten!**

Fußwinkelverstellung

Der Fußwinkel lässt sich in Stufenschritten verstellen.
Durch Umlegen der Verschlusshebel an den beiden Rastergelenken rechts und links, lässt sich das Fußteil im Winkel verstellen.

Wenn Sie die benötigte Position gefunden haben, drücken Sie die Verschlusshebel wieder zurück und die Gelenke rasten wieder ein.

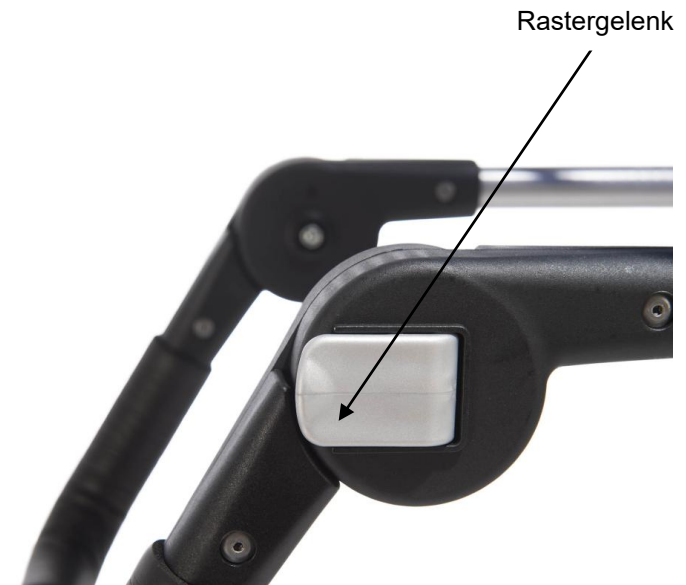

 **Achtung: Die Gelenke müssen hörbar einrasten!**