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




Fachhändlerstempel



Seriennummer



TOSCH Kinderreha OHG
Hollenbergstraße 5
D-49492 Westerkappeln
Tel.: 05456/935808
Fax: 05456/935809
e-mail: tosch-kinderreha@gmx.de

TOSCH Kinderreha

Badewannenuntergestell – Inga Wanne

Gebrauchsanleitung



Die CE-Kennzeichnung bestätigt die Übereinstimmung mit den Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte.

Stand, Stand, 02.2022

Inhalt	2
Vorwort	2
Konformitätserklärung	2
Sicherheitshinweise	3
Auspacken und Aufstellen	4
Nutzungsdauer und Wiedereinsatz	4
Weitenverstellung	5
Weitenverstellung der Standfüße	5
Höhenverstellung der Badeliegenaufnahme	6
Befestigung der Liege auf der Aufnahme	7
Wartung und Reinigung	7
Technische Angaben / Daten	8
Gewährleistung / Garantie	9

Notizen:

Vorwort

Sie haben sich für Badelwannenuntergestell der Firma TOSCH Kinderreha OHG entschieden und bekommen hiermit ein qualitativ hochwertiges Produkt aus unserem Hause.

Benutzen sie diese Gebrauchsanleitung, damit unser Produkt Ihnen hilft, den Alltag zu erleichtern.

Um Bedienungsfehler zu vermeiden und ein Höchstmaß an Sicherheit zu erlangen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanleitung bitte genau durch und machen Sie sich gegebenenfalls eine Kopie.

Konformitätserklärung

Die Firma TOSCH, Kinderreha OHG erklärt als Hersteller in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG übereinstimmt.

Notizen:

Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich vor dem Gebrauch dieses Produktes die Gebrauchsanleitung gut durch.

Machen Sie sich vor Gebrauch zuerst mit der Handhabung und der Funktion des Produktes vertraut und üben sie den Umgang mit diesem.

Fertigen Sie sich gegebenenfalls eine Kopie der Gebrauchsanleitung an.



Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Medizinprodukt.



- **Achtung: Lassen Sie Ihr Kind in keinem Falle unbeaufsichtigt auf der Badeliege liegen.**
- **Bei Anrufen, Besuch an der Tür oder ähnlichen Dingen, nehmen Sie Ihr Kind mit!**
- Das Produkt darf nur auf ebenem und festem Untergrund verwendet werden.
- Die maximale Belastung (siehe Typenschild) darf nicht überschritten werden.
- Nach allen Einstellarbeiten die zuvor gelösten Gelenke immer wieder gut einrasten lassen.
- Auch wenn Ihr Kind auf der Badeliege mit einem Gurt gesichert ist, lassen Sie es nie unbeaufsichtigt..
- Es darf immer nur ein Kind zur Zeit auf der Badeliege – dem Untergestell liegen.

Auspacken und Aufstellen

In der Originalverpackung befinden sich folgende Komponenten:

1. Badewannenuntergestell **Inga wanne**
2. Gebrauchsanleitung
3. Zubehör, je nach Bestellung

Entnehmen Sie zunächst bitte vorsichtig das Untergestell aus dem Karton:

1. Das Untergestell muss nicht montiert werden.

Nutzungsdauer und Wiedereinsatz

Die zu erwartende Nutzungsdauer unseres Produktes, beträgt bis zu acht Jahren, wenn die Nutzung in Übereinstimmung mit den Angaben in dieser Gebrauchsanleitung erfolgt.

Das Produkt kann über diesen Zeitraum hinaus verwendet werden, wenn es sich in einem sicheren Zustand befindet.

Die zu erwartende Nutzungsdauer bezieht sich nicht auf Verschleißteile wie z.B. Knickgelenke und Verstellteile in VA.. Die Wartung und Beurteilung des Zustandes und gegebenenfalls der Wiedereinsatzbarkeit obliegt dem Fachhandel. Inga wanne ist für den Wiedereinsatz geeignet. Führen Sie bitte die üblichen Reinigungs- und Desinfektions-Maßnahmen durch.

Begleitpapiere wie z. B. diese Gebrauchsanleitung sind Bestandteil des Produkts und müssen an den neuen Nutzer übergeben werden.

Sollte es während der Nutzungsdauer bei der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts zu einem schwerwiegendem Vorkommnis kommen, ist dies unverzüglich dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden

Gewährleistung/Garantie

1. Mängel sind spätestens innerhalb 1 Woche schriftlich anzuzeigen, sonst gilt die Ware als angenommen. Die Wochenfrist beginnt mit Empfang der Ware. Bei Transportschäden ist der Spediteur sofort zur Schadensfeststellung heranzuziehen.
2. Für die sachgemäße Ausführung übernehmen wir eine Gewähr für alle innerhalb von 6 Monaten nach Lieferung nachweislich durch Werkstoff- oder Herstellungsfehler schadhaft oder unbrauchbar gewordenen Teile, die sodann nach unserer Wahl unentgeltlich ersetzt oder ausgebessert werden.
3. Durch Änderungs- oder Instandsetzungsarbeiten, die der Auftraggeber oder ein Dritter ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung vornehmen, wird die Gewährleistung aufgehoben.
4. Ausgeschlossen aus der Mängelhaftung sind alle einer natürlichen Abnutzung unterworfenen Teile, sowie die Folgen übermäßiger Beanspruchung, nachlässiger oder unrichtiger Beanspruchung und gewaltsamer Beschädigung.
5. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nur, wenn wir die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung ablehnen oder unzumutbar verzögern.
6. Weitgehende Schadensersatzansprüche des Auftraggebers oder Dritter, insbesondere Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, bestehen nicht.

Entsorgung:

Sollte Inga wanne einmal der Entsorgung zugeführt werden müssen, wenden Sie sich bitte an den Entsorger in Ihrer Stadt.
Inga wanne lässt sich ohne Probleme recyceln.

Der Rohrrahmen aus Edelstahl gehört zu den Metallabfällen.

Die Kartonasche führen Sie bitte dem Altpapier zu.

Technische Angaben/ Daten

Material: Aluminiumrohr
Oberfläche: Pulverbeschichtung

Länge gesamt	100 cm
Breite gesamt	45 cm
Liegehöhe von – bis (von Liegefußaufnahme)	48 - 65 cm
Eigengewicht	0,00 Kg
max. Belastung	80 Kg.

Auspacken und Aufstellen

In der Originalverpackung befinden sich folgende Komponenten:

4. Badewannenuntergestell **Inga wanne**
5. Gebrauchsanleitung
6. Zubehör, je nach Bestellung


Entnehmen Sie zunächst bitte vorsichtig das Untergestell aus dem Karton:

2. Das Untergestell muss nicht montiert werden.

Höhenstellung der Standfüße

Der Fußwinkel lässt sich in Stufenschritten verstellen.
Durch Umlegen der Verschlusshebel an den beiden Rastergelenken rechts und links, lässt sich das Fußteil im Winkel verstellen.

Wenn Sie die benötigte Position gefunden haben, drücken Sie die Verschlusshebel wieder zurück und die Gelenke rasten wieder ein.

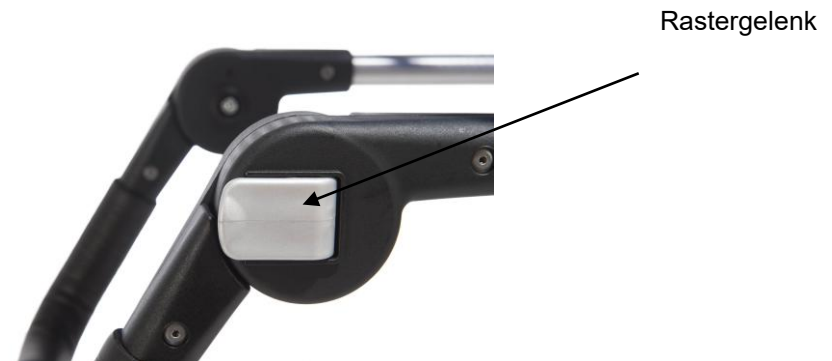

Achtung: Die Gelenke müssen hörbar einrasten!

Höhenverstellung Badeliegenaufnahme (Zubehör)

Die Badeliegenaufnahmen lassen sich stufenlos in der Höhe Ihren Bedürfnissen anpassen.

Durch Lösen der vier Madenschrauben an den beiden Aufnahmen, lässt sich die Höhe der Aufnahmen einstellen.

Wenn Sie die benötigte Höhe eingestellt haben, ziehen Sie die Madenschrauben wieder gut fest.



Madenschraube

Madenschraube




Achtung: Die Verschraubung stets festziehen und prüfen!

Befestigung der Liege auf dem Untergestell

Die Badeliege wird in die vorher eingestellten Aufnahmeschalen gestellt.

Vier Klettbänder werden stramm um die Füße der Badeliege gewickelt

Das Klettband ist fest mit der Aufnahme verschraubt und kann nicht verloren gehen.

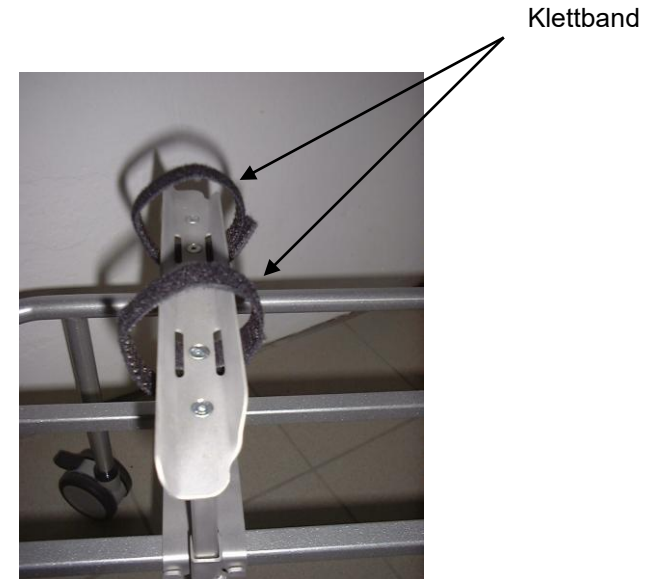

Wartung und Reinigung:

Lisa ist weitgehend wartungsfrei.

Die Reinigung des Rohrrahmens kann mit Wasser und gebräuchlichen Haushaltsmitteln (Neutralseife) erfolgen.